

## 取り扱い説明書

### はじめに

本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。安全かつ適切にご使用頂くため、本書をお読みの上で用法を守って正しくお使い下さい。また、いつでもお読みいただけるように大切に保管して下さい。

### 付属品・各部説明

●測定モード切り替えスイッチ

●モニター



左から ●SET ボタン  
●+ ボタン  
●- ボタン

●温度検知部分


●測定ボタン

●電池ボックス

(付属品)

○本体 ○本説明書

### 使用方法

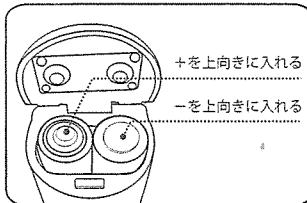

【電池の入れ方】  
本体底部にある電池ボックスを開き、単三電池2本(別売り)を入れます。

蓋を開いて左側は+が上になるように入れ、右側(測定モード切り替えスイッチ/ボタン類)は-が上になるように入れてください。

※仕様により、充電電池をご使用いただけません。予めご了承ください。

### 【温度の測定】

① 温度を測りたい対象へ温度検知部分を向け、対象と約1~15cm(推奨距離1~3cm)ほど距離が開いた状態で、トリガースイッチを押してください。

② 約1秒ほどでモニターに測定温度が表示されます。

③ 8秒程操作せずにいると自動で電源がOFFになります。

### 【測定結果の表示】

●通常測定モード (Body モード)

32℃> : LOと表示 (測定不能)  
32℃~37.4℃ : 測定温度が表示、バックライトが緑色に点灯  
37.5℃~38.4℃ : 測定温度が表示、バックライトが黄色に点灯  
38.5℃~42.9℃ : 測定温度が表示、バックライトが赤色に点灯  
>42.9℃ : HIと表示 (測定不能)

●表面温度測定モード (Object モード)

0℃> : LOと表示 (測定不能)  
>80℃ : HIと表示 (測定不能)

### 【測定記録の確認】

測定結果は32件分遡ることができます。測定記録は画面に測定結果が表示されている状態で +/- ボタンを押すことで確認ができます。

測定結果表示中はモニター左に「M」と表示されます。

※記録は32件以上たまると自動的に古い記録(O1)から順に上書きされます。ご了承ください。


### 【モードの切り替え】

本製品には2種類の測定モードがあります。

モードは本体側面にある測定モード切り替えスイッチを動かすことで切り替えが可能です。



①通常測定モード (Body モード)  
…通常温度を測定するモードです。測定モード切り替えスイッチ「Body」に動かすことで使用できます。モニター上方には人のアイコンが表示されます。

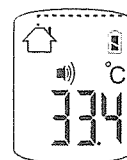

②表面温度測定モード (Object モード)  
…物体の表面温度を測定するモードです。測定モード切り替えスイッチを「Object」に動かすことで使用できます。モニター上方には家のアイコンが表示されます。

### 【設定の変更】

モニターに測定画面が表示されている状態で、SET ボタンを長押しすると以下の各種設定が可能です。

※本企画において (F1) (F2) に機能設定はございません。ご了承ください。

### (F3) 温度の校正

① 本体のSET ボタンを長押しした後、2回SET ボタンを短押しするとモニターに「F3」と表示されます。「F3」が表示された状態で +/- ボタンを押すと温度の校正が行えます。温度は±1.6℃調整が可能です。

② SET ボタンを、2回押し画面が消灯すると設定が完了します。

### (F4) ビープ音のON/OFF

① 本体のSET ボタンを長押しした後、3回SET ボタンを短押しするとモニターに「F4」と表示されます。「F4」が表示された状態で +/- ボタンを押すとビープ音のON/OFFが切り替えられます。ビープ音がONの場合モニターにメガホンマークが表示され、OFFの場合はモニターのメガホンマークが消えます。

② SET ボタンを、1回押し画面が消灯すると設定が完了します。

### 使用上・安全上の注意

○本製品は医薬品・医薬部外品ではありません。○実際の温度と多少の誤差が生じる場合がありますので、取引または証明用として使用することはできません。○充電電池をご使用いただけません。ご了承ください。○周囲の温度が大きく変動する場合(室内から屋外など)は、10分程度放置してから測定してください。○本製品に強い力をかけたり、重い物を置かないでください。○本製品を投げたり、振り回したりしないでください。○分解、改造は絶対におやめください。○強い衝撃を加えたり、変形、落下させたりしないで下さい。○高温多湿な場所には置かないでください。○長時間、直射日光の当たる場所に置くと、変色/劣化する恐れがあります。直射日光の当たる場所は避けて下さい。○幼児の手の届く場所には、置かないでください。○古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使わないでください。○電池の+ (プラス) マイナス (-) を正しくセットしてください。○万が一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。○長時間使用しない場合は電池を外してください。○万が一破損した場合は、ご使用にならないでください。○濡れた手でさわらないでください。感電する恐れがあります。○ショートさせたり、加熱・火の中に入れてたりしないでください。○譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合は、弊社サポート対象外となります。○本製品の使用により、生じた損害、逸失利益又は第三者からのいかなる請求についても当社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。○万が一、不良・不具合が発生した場合は弊社サポートセンターまでご連絡ください。

### お問い合わせ先

## 株式会社レッドスパイス

〒231-0032  
横浜市中区不老町2-8-8 不二ビル5F  
Mail: info@redspyce.com  
営業日: 月~金【祝日、特定日を除く】

## 保証書

RS-E1380 3color バックライト非接触型温度計

お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には無償で交換等対応させていただきます。商品と本書をご提示のうえ弊社、または販売店舗までご連絡ください。

ご購入日	年	月	日
------	---	---	---

保証期間: ご購入日より6ヵ月間

販売店	販売店名・住所・電話番号
-----	--------------

ご購入時に発行されるレシートは大切に保管しておいて下さい。

保証期間内でも、次のような場合には保証対象外となります。

- ご購入日・ご購入店舗が不明な場合。
- 本書の提示がない場合(販売店発行の保証書シール、レシート、納品書等ご購入年月日が証明できる書類にて代替えることができます。)
- 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障やお買い上げ後の落下等お客様の過失・故意による故障、経年劣化による故障。
- 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変等外部要因による故障または損傷。
- オークション等個人売買により取得された場合。

※本書は明記した期間、条件のもとにおいて無償で交換等対応をお約束するものです。本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※本書は日本国内においてのみ有効です。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

株式会社  
レッドスパイス

〒231-0032  
神奈川県横浜市中区不老町2-8-8 不二ビル5F  
TEL : 0120-970-950  
Mail : info@redspyce.com  
営業日 : 月~金【祝日、特定日を除く】  
営業時間: 10:00~17:00