

Rooro マスクスペーサー (マスクフレーム) 取扱い説明書

仕 様

素材：ポリエチレン
サイズ：約 W110×H80×D40mm
重量：6g

取 付 方 法



① マスクスペーサー (マスクフレーム) をマスクの内側にセットします。

※本商品に固定用フックは付いておりません。

② セットしたマスクを位置を調整しながら装着します。

ご使用上の注意

■乳児や呼吸器に異常がある方、ご自身でマスクの着脱が不可能な方は、ご使用にならないでください。■開封後、一度洗ってからのご使用をお勧め致します。■本品は繰り返し洗ってご使用いただけます。■汚れた場合は手洗いしてください。■ご使用により破損した場合は、使用をお止めください。■本品はマスクの予防効果について保証するものではありません。■本品は有害な粉じんやガス等が発生する場所での使用はできません。■皮膚に異常がある場合や、異常が現れた場合はただちに使用を中止してください。■お子様の手の届かない場所に保管してください。■直射日光を避け、高温多湿な場所に置かないでください。■火や熱源のそばに置かないでください。■万が一かゆみ・かぶれ等の症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。■本品が触れる箇所に傷や炎症等がある場合は、悪化することがありますので、使用を避けてください。■個人差によりメガネが曇る場合がありますので、運転の際などは十分にご注意ください。■表記サイズよりも多少の誤差がある場合がございます。■製品の特性上、変色する場合がございますが、品質・性能に問題はございません。■使用後は地方自治体の区分に従って破棄ください。■本品を使用し発生したトラブル、事故、損害などにつきましては、弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

Rooro

Rooro 株式会社 Rooro 事業部

〒669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川 1385

TEL:0795-77-2151 FAX:0795-77-3535

URL: <https://www.rooro.jp>